

UPORABNIŠKI PRIROČNIK – SLO

Dodatni električni pogon za invalidske vozičke inSPORTline Oppatia (T08) IN26785



VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo preberite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
- Uporabljajte samo za namene, za katere je bil izdelan.
- Ni primerno za uporabo v javnem prevozu. Če niste prepričani, se posvetujte z lokalnimi oblastmi.
- Ne uporabljajte pogona, če ste pod vplivom alkohola, zdravil ali drog.
- Za upravičenost se posvetujte z zdravnikom.

OPIS IZDELKA



ZASLON



1. Luči
2. Način hitrosti
3. Hitri način
4. Vožnja
5. Stanje baterije
6. Počasni način
7. LED gumb

SPECIFIKACIJE

Okvir: aluminij 6061

Motor: 36 V, 350 W brezkrtačni motor

Krmilnik: inteligentno upravljanje

Baterija: 36 V, 7,8 Ah, litijeva baterija z LG celico

Polnilnik: AC 100–240 V, 2 Amp, pametni polnilnik

Zaslon: LED zaslon na dotik

Luči: sprednje LED luči

Zavore: bobnaste zavore

Kolesa: INNOVA 8½ × 2,5

Največja hitrost:


- Način 1: 6 km/h
- Način 2: 15 km/h
- Način 3: 20 km/h
- Vzratna vožnja: 4 km/h

Doseg: 25 km

Čas polnjenja: 2–4 ure

Omejitev teže: 115 kg

POLOŽAJI MOTORJA

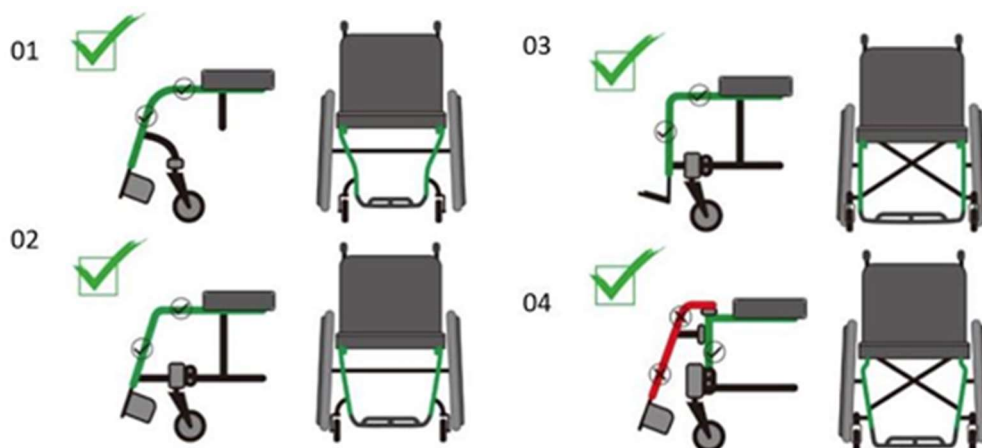

SESTAVLJANJE

NASLON ZA NOGE





S ključem odvijte vijake, poravnajte luknje in pritrdite naslon za noge z vijaki.

Poravnajte ročaje z luknjami.




NASTAVITEV ŠIRINE DRŽALA

1. Vstavite podložko v vijak in nato pritrdite ročaj na vijak.
2. Odvijte matice na obeh straneh in enakomerno prilagodite širino.
3. Prilagodite kot nosilcev.

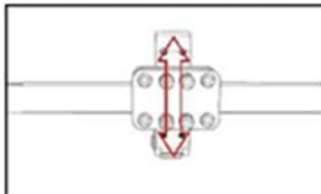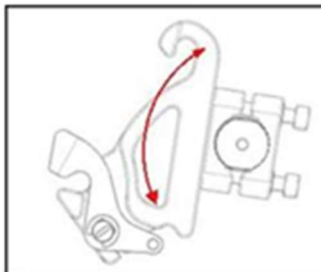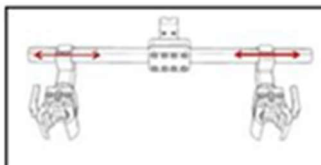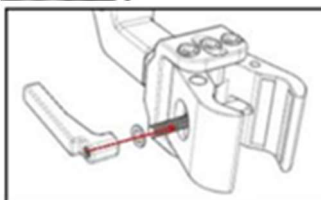


PRITRDITEV NOSILCA

Odvijte označene vijake in enakomerno prilagodite širino držala.

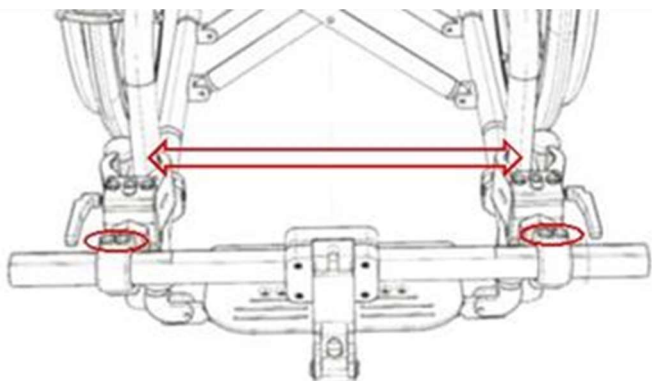

Odvijte matice in prilagodite nagib glede na vrsto invalidskega vozička.

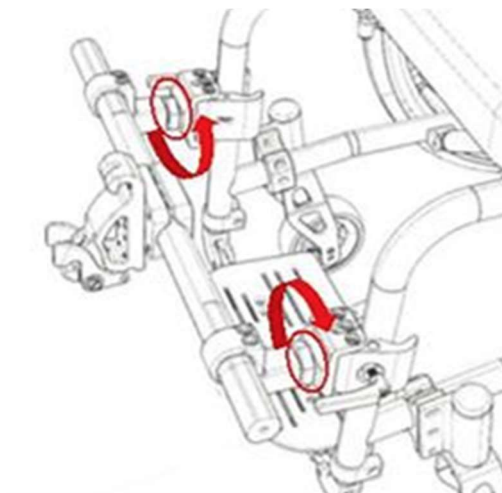

Pogon pritrdite na nosilec. Zgornji kavelj mora biti 2–3 cm višje od osi držala.




Kot je prikazano na sliki, povlecite sprednji del pogona nazaj, dokler se zgornji kavelj ne zaskoči. Nato primite ročaj in ga potisnite naprej in navzgor, dokler ne zaslišite klika, kar pomeni, da je kavelj pritrjen.



RAZDALJA SPREDNJIH KOLES

Prilagodite višino sprednjih koles pod obremenitvijo. Priporočena razdalja od tal je 4–6 cm.

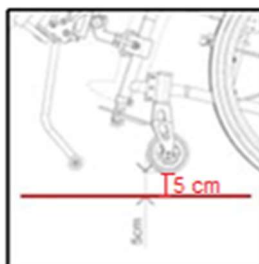


NASTAVITEV VIŠINE SPREDNJIH KOLES

Višino sprednjih koles prilagajajte le, ko je invalidski voziček obremenjen. Če je višina sprednjih koles od tal manjša od 4 cm, je treba prilagoditi kot nosilca motorja.


Priporočena razdalja je 4–6 cm. Odvijte označene vijake in jih obrnite za približno 2° v nasprotni smeri urinega kazalca.

Nato privijte vijake in preverite višino sprednjih koles.

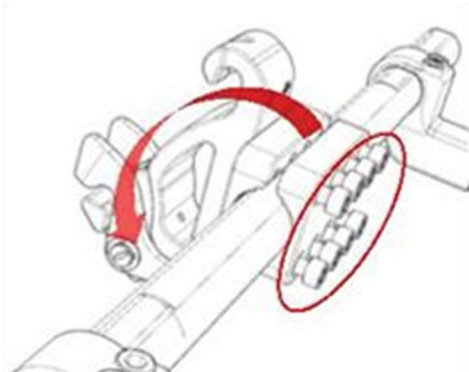

ODKLOP POGONA

Izklopite pogon in potisnite ročaje naprej in navzgor, medtem ko spodnji del pogona držite proti sebi, dokler se ne odklopi. Sprednja kolesa se bodo začela dotikati tal, potisnite ročaje navzdol in pogon se bo odklopil.

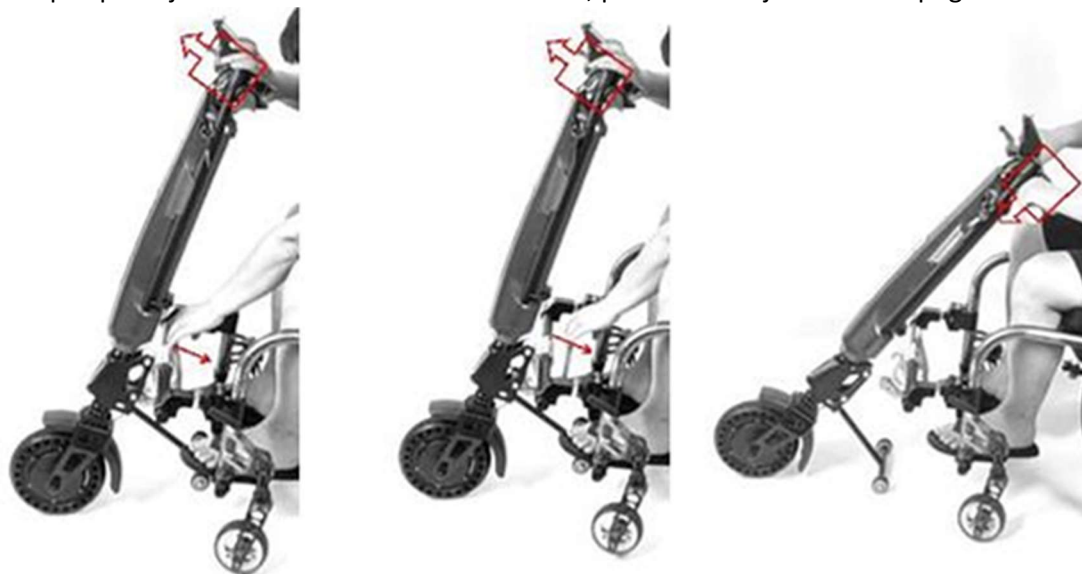

BATERIJA


Odstranjevanje baterije

- Izklopite napajanje in odstranite napajalni kabel.
- Odklenite baterijo in jo pomaknite navzgor.
- Dvignite baterijo približno za 1 cm in jo nato odklopite navzven.



Polnjenje

- Izklopite napajanje in odstranite napajalni kabel.
- Odprite pokrov priključka za polnjenje.
- Priključite polnilnik.
- Po končanem polnjenju ponovno namestite gumijast pokrovček.

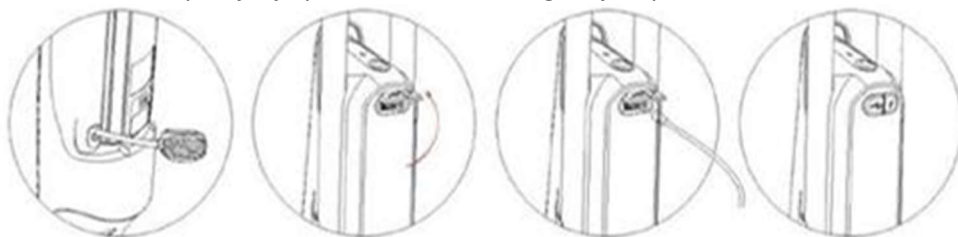

OPOZORILO



Hranite kontakte baterije stran od kovinskih ali prevodnih predmetov – lahko pride do kratkega stika ali poškodbe baterije.



Hranite stran od gorljivih materialov.

Ne izpostavljajte vročini ali odprtemu ognju.

Ne prevažajte baterije skupaj z vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali.



Ne razstavljajte ali popravljajte baterije – vsebuje kisline.



Ne mečite je v odprt ogenj.

- Ne priključujte baterije neposredno na polnilne kable.
- Ne uporabljajte pogona med polnjenjem baterije.
- Ne priključujte baterije na generatorje ali druge vire napajanja, ki ne ustrezajo zahtevam polnilnika.
- Zaščitite napajalni kabel pred poškodbami.
- Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Če pride med polnjenjem do kratkega stika, takoj prekinite polnjenje.
- Baterijo je treba pred prvo uporabo popolnoma napolniti (to lahko traja do 24 ur).
- Po prvi uporabi baterijo popolnoma izpraznite, preden jo znova napolnite.
- Pred uporabo se prepričajte, da je baterija zadostno napolnjena. Če je prazna, traja polnjenje 6–8 ur.
- Če baterije dalj časa ne boste uporabljali, priporočamo, da jo napolnite vsaj vsakih dva meseca.
- Življenjska doba baterije je do 700 tednov polnilnih ciklov (2–5 let).

KODE NAPAK IN REŠITVE

01E	Zaščita pred preobremenitvijo	Zamenjajte krmilno ploščo pogona. Zamenjajte motor.
02E	Zaščita pred prenizko napetostjo	Napolnite ali zamenjajte baterijo. Zamenjajte tiskano vezje.
03E	Zaščita pred visoko napetostjo	Zamenjajte krmilno ploščo. Zamenjajte baterijo.
04E	Zaščita zaklenjenega rotorja	Zamenjajte elektronski krmilni sistem.
05E	Okvara mostu MOS pogonske cevi	Zamenjajte krmilno ploščo.
06E	Okvara spodnjega mostu MOS cevi	Zamenjajte krmilno ploščo.
07E	Napaka Hallovega kabla	Zamenjajte kabel. Zamenjajte krmilno ploščo.
09E	Okvara ročice	Zamenjajte ročice. Zamenjajte krmilnik
10E	Okvara zavor	Zamenjajte zavore Zamenjajte krmilno ploščo
12E	Komunikacijska napaka	Zamenjajte komunikacijski kabel Zamenjajte krmilno ploščo
Slab prikaz	Zamenjajte krmilno ploščo pogona	
Motor teče nepravilno	Zamenjajte krmilno ploščo pogona Ponovno priključite fazni vodnik krmilne plošče pogona	

VARSTVO OKOLJA

Po preteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo neekonomično, ga oddajte v skladu z lokalnimi zakoni in okolju prijazno na najbližjem odlagališču odpadkov. S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagate zaščititi zdravje ljudi. Če niste prepričani o pravilnem odstranjevanju, se obrnite na lokalne oblasti, da se izognete kršitvam zakona ali sankcijam. Baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke, temveč jih oddajte na zbirališče za recikliranje.