

PRIROČNIK ZA UPORABO – SLO
IN25635 Električni invalidski voziček inSPORTline Hawkie



VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
 - Naprave ne uporabljajte, če se pojavijo ostri robovi.
 - V primeru okvare takoj prenehajte z uporabo in se obrnite na servis. Invalidskega vozička ne popravljajte sami.
 - Pred uporabo se naučite uporabljati invalidski voziček, poiščite varen in odprt prostor ter poiščite pomoč druge osebe, dokler ne boste lahko varno uporabljali invalidskega vozička.
 - Pred vklopom in izklopom se prepričajte, da je izdelek izklopljen.
 - Vedno vozite s takšno hitrostjo, da ne ogrožate sebe, drugih in njihove lastnine.
 - Vedno priporočamo, da začnete z najnižjo prestavo.
 - Nekateri komunikacijske naprave lahko delujejo na isti frekvenci kot daljinski upravljalnik invalidskega vozička. Če imate s seboj takšno napravo (telefon ipd.), preverite, da ne bo motila krmilnika.
 - Nekateri oddajniki lahko motijo daljinsko upravljanje invalidskega vozička.
 - Če opazite kakršno koli neželeno premikanje ali če se voziček nenadoma ustavi, ga takoj izklopite.
 - Ne popravljajte ali spreminjajte izdelka.
 - Če pride do katere koli od opisanih situacij, takoj izključite invalidski voziček: nenaden premik brez posredovanja uporabnika, smeri vožnje ni mogoče nadzorovati, odpoved zavor.
 - Invalidski voziček je zasnovan za prevoz ene osebe.
 - Ne vozite po prestrmih klancih.
 - Ne vozite pod vplivom mamil, zdravil ali alkohola.
 - Za vozičkom ne vlecite drugih vozil ali predmetov.
 - Invalidskega vozička ne vlecite za drugimi vozili.
 - Ne prekoračite največjega dovoljenega voznega kota.
 - Med premikanjem invalidskega vozička ne premikajte krmilne palice.
 - Invalidski voziček je samo za eno osebo in ne sme presegati največje nosilnosti invalidskega vozička.
 - Ne izklaplajte invalidskega vozička, medtem ko se premika, saj lahko poškodujete motor ali krmilne elemente.
- Invalidski voziček izklopite šele, ko izgubite nadzor.

- Ne vozite po površini, ki ni tlakovana (pesek, globoka trava, drobna ilovica itd.)
- Ne vozite po stopnicah.
- Pred čiščenjem in vzdrževanjem se prepričajte, da je invalidski voziček izklopljen.
- Ne vklaplajte invalidskega vozička, razen če sedite na njem.
- Voziček ni namenjen za uporabo na javnih cestah. Vozite samo po za to določenih cestah (pločnik).
- Ne spreminjajte nenadoma smeri (naprej - nazaj). Spremenite smer vožnje, ko se invalidski voziček ustavi.
- Vedno vozite navzdol z najnižjo hitrostjo in pustite krmilno ročico blizu srednjega položaja.
- Noge naj bodo vedno na naslonu za noge.
- Pred vožnjo se prepričajte, da je baterija povsem napolnjena.
- Invalidski voziček polnite v dobro prezračenem prostoru.
- Pred vožnjo preverite, ali so vsi deli zategnjeni in pravilno delujejo.
- Pred vzvratno vožnjo se prepričajte, da za vami ni ovir. Vzvratno na najnižjo hitrost.
- Izogibajte se nenadnim premikom in nenadnim spremembam smeri.
- Roke in noge držite na naslonih.
- Ne vozite čez ovire, višje od 5 mm.
- Ne vozite čez reže, daljše od 10 cm.
- Največji naklon je 12 °.
- Če se vozite v klanec, ne vozite vzvratno.
- Ne vozite po površini, ki je nagnjena za več kot 3° vstran.
- Ne vozite po mehkih, neravnih ali nezavarovanih površinah (trava, prod).
- Pred vožnjo navzdol nastavite najnižjo hitrost, vožnja navzdol poveča zavorno pot.
- Ne vozite skozi neravnine, kot so stebrički itd.
- Ne vozite v vodi, na ledu ali snegu ali v slabih vidljivostnih razmerah.
- Vozička ne puščajte izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali drugim vremenskim vplivom.
- Zaščitite pred dežjem in vodo.
- Nadzorna plošča ni vodotesna.
- Redno preverjajte stanje pnevmatik. Takoj zamenjajte obrabljene pnevmatike.
- Ne vozite v dežju ali po mokrih cestah. Obstaja nevarnost poškodbe elektronike in baterije.
- Daljinski upravljalnik napajajo 2x AAA baterije.
- Skupna obremenitev: 130 kg
- Daljinsko upravljanje do 15 m (odvisno od okoljskih pogojev)
- Največja hitrost do 6 km/h pri optimalnih pogojih
- Največji doseg do 24 km pod optimalnimi pogoji
- Invalidski voziček poganjata 2x 350W motorja

OPIS IZDELKA



1. Ročaj iz pene
2. Krmilna palica za 360°
3. Sedež, ki diha
4. Vzmetenje udarcev
5. Aluminijska opora za noge
6. 8" sprednja kolesa
7. Prostor za shranjevanje
8. Odstranljiva baterija
9. 13" zadnja kolesa
10. Stranski žepi
11. Nasloni za roke nastavljivi po višini
12. Nastavljivo hrbtišče

RAZPAKIRANJE IN PRVA PRIPRAVA

Izvlecite stol in vse njegove sestavne dele iz embalaže in se prepričajte, da so vsi deli prisotni.



Krmilno palčko pritrdite na desno stran ročaja.



Primitite invalidski voziček za naslonjalo in sedež, razprite voziček.



Zategnite zaklepno zaponko (postavite zaponko v obliki črke U na zaklepno zaponko in povlecite navzdol)



Naslona za roke potisnite navzdol in zaklenite z gumbom, tako da gumb obrnete navzgor.



NADZOR




1. Prikaz zmogljivosti baterije
2. Stikalo za vklop
3. Prikaz hitrosti prestave
4. Zmanjšanje hitrosti -
5. Trobilo
6. Povečanje hitrosti +
7. Krmilna palica za 360 °

UPORABA

Pred vožnjo se seznajte s krmilnimi elementi. Najprej poskusite voziti s pomočjo druge osebe na varnem mestu brez prometa.

Vedno se prepričajte, da je invalidski voziček izklopljen, preden sedete nanj. Največjo hitrost nastavite glede na svoje sposobnosti. Priporočamo, da hitrost pustite pri nižjih vrednostih, dokler se popolnoma ne seznajte z upravljanjem vozička.

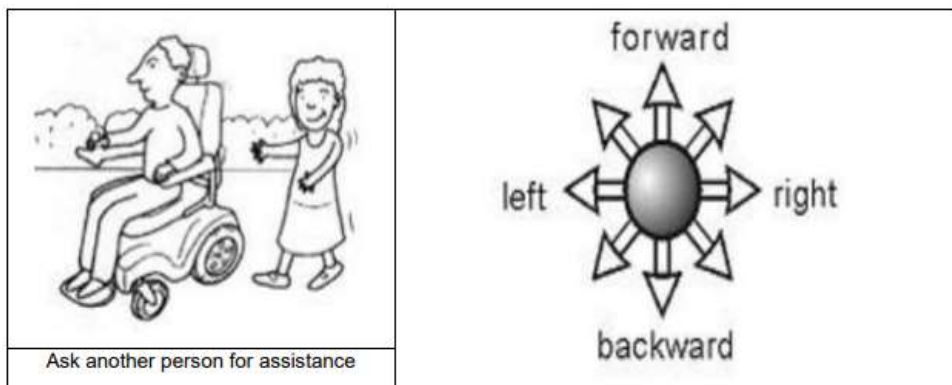


Prosite drugo osebo za pomoč

Vedno vadite nadzor pri najnižji hitrosti. Krmilno palčko vedno premaknite v želeno smer vožnje.

Poskusite najprej napredovati. Nato poskusite s "S zavoji".

Ko znate voziti naprej in zavijati, se naučite vzvratno. Pri vzvratni vožnji bodite pozorni na svojo hitrost in na to, ali so na poti drugi ljudje ali ovire.

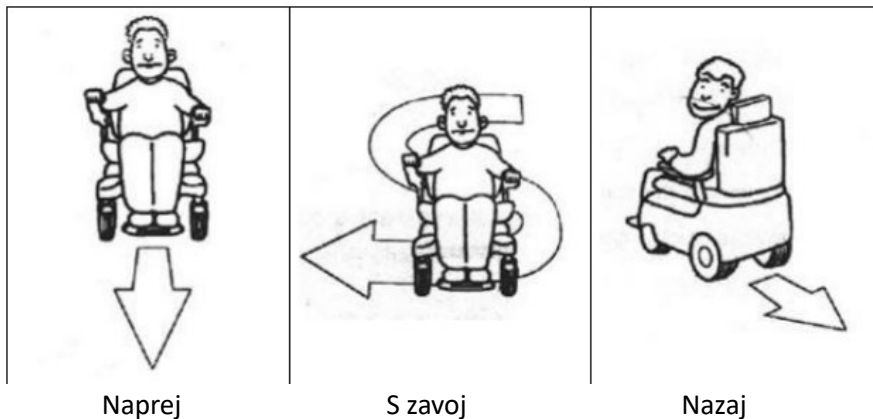

Naprej

S zavoj

Nazaj

Takoj, ko spustite krmilno palčko, se invalidski voziček ustavi.

Če pride do ene od naslednjih situacij, takoj izklopite invalidski voziček in odklopite akumulator:

- Nenaden premik brez vhodnega signala
- Smer vožnje ni pod nadzorom
- Okvara zavore

Med vožnjo upoštevajte ta navodila:

- Med vzvratno vožnjo se prepričajte, da za vami ni ovir. Vedno vzvratno vozite v najnižji prestavi.
- Zavirajte počasi. Ne delajte nepravilnih in nenadnih sprememb v gibanju.
- Okončine vedno držite na naslonih za roke in noge.
- Nikoli ne vozite čez ovire, ki so višje od 5 mm.
- Nikoli ne vozite čez reže, širše od 10 cm.
- Ne vozite po terenu z naklonom večjim od 12°.
- Nikoli ne vozite vzvratno na nagnjenem terenu.
- Ne vozite po nagnjeni površini, obstaja nevarnost prevrnitve.
- Ne vozite po neasfaltiranem terenu, kot so trava, makadam ali poškodovana cesta.
- Pri vožnji navzdol vozite počasi in nadzorujte hitrost.
- Preden zapustite invalidski voziček, se prepričajte, da ste na ravni površini in da je voziček izklopljen.

NADZORNA PLOŠČA IN JOYSTICK

Pritrdite nadzorno ploščo na desni ročaj.

Nastavite želeno razdaljo in privijte matico.


Priključite na desno in levo stran motorja in akumulatorja.

1. Krmilna palica
2. Nadzorna plošča in gumbi
3. Napajalna vrata


Kontrole in gumbi



Pogled na celotno nadzorno ploščo

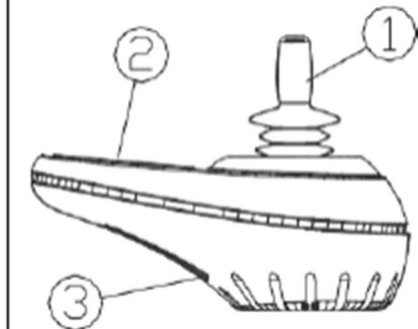


Napajalna vrata

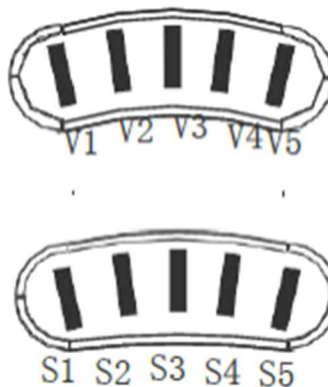

Zaščitite nadzorno ploščo pred udarci in poškodbami. Pred vožnjo se prepričajte, da so krmilni elementi pravilno povezani in se odzivajo na vaš vnos.

Vozička in nadzorne plošče ne puščajte dlje časa v vlažnem okolju. Zaščitite pred onesnaženjem s hrano ali okoljem. Nadzorno ploščo previdno očistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

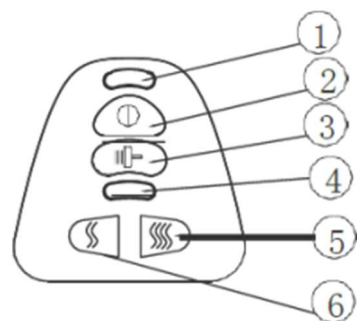

1. Prikaz zmogljivosti baterije
2. Stikalo za vklop
3. Trobilo
4. Prikaz hitrosti prestave
5. Povečanje hitrosti +
6. Zmanjšanje hitrosti -

Gumb on / off se uporablja za vklop/izklop vozička. V nujnih primerih se lahko uporablja za takojšnji izklop z vozička.

Indikator stanja baterije prikazuje trenutno napolnjenost baterije. Indikator prikazuje stanje baterije ob zagonu.

Ko se voziček zažene, svetijo vsi indikatorji, ko je voziček izklopljen, vsi indikatorji ugasnejo.

Krmilna palica se uporablja za nadzor hitrosti in smeri gibanja. Bolj kot je krmilna palica od središča, večja je hitrost premikanja. Takoj, ko spustite krmilno palico ali je na sredini, se invalidski voziček ustavi.

Indikator prestave je prikazan v 5 segmentih 1 (najnižja) - 5 (najvišja).

Ko pritisnete gumb hupe, se oglasi zvočno opozorilo.

Prestavni gumbi povečajo ali zmanjšajo prestavo.

DALJINEC

Daljinski upravljalnik napajajo 2x AAA baterije.

Gonilnik deluje na frekvenci 2,4 GHz



Vklopite nadzorno ploščo na vozičku.



Pritisnite gumb za vklop na daljinskem upravljalniku za 5 sekund.



Držite gumb za prestavljanje, dokler indikator prestavljanja ne zasveti rumeno.



Pritisnite hupo, komande bodo preklopile v način seznanjanja.



Držite puščico navzdol na daljinskem upravljalniku, dokler se gumb za vklop na daljinskem upravljalniku ne ustavi utripajoča.



Kontrole so seznanjene.



ROČNA ZAVORA

Na zadnjih kolesih je ročna zavora. Po parkiranju z mehansko zavoro ustavite invalidski voziček. Ko je zavora v položaju "ročno", lahko voziček potiskate kot navaden invalidski voziček.



OPOZORILO: Invalidski voziček potiskajte le, če ni mogoče uporabiti električnega motorja.

Za potiskanje invalidskega vozička preklopite parkirne zavore, da se voziček lahko premika in potiska voziček.

ZLAGANJE

Obrnite gumb navzdol, da sprostite naslonjala za roke.




Sprostite zadnji nosilec, sprostite U zaponko.
Primite sedež in zadnji ročaj, zložite stol.



ODKLOP BATERIJE

1. Izključite napajalni kabel.
2. Pritisnite zapah za sprostitev baterije in izvlecite baterijo.

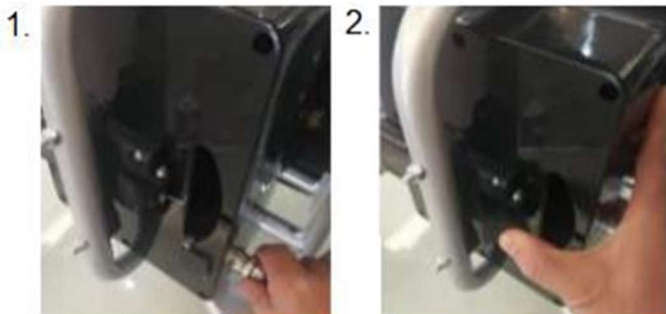

BATERIJA

Invalidski voziček uporablja 24 V 12 Ah litijevo baterijo. Baterijo menjajte samo na pooblaščenem servisu.

6-mesečna garancija na baterijo – zagotavljamo, da nazivna kapaciteta baterije ne pade pod 70 % celotne zmogljivosti v 6 mesecih od prodaje izdelka. Takoj prenehajte uporabljati baterijo, če je baterija poškodovana, iz nje pušča tekočina ali začutite nenavaden vonj.

- Življenjska doba baterije je omejena. Če uporabljate baterijo, ki presega običajno življenjsko dobo, se lahko poveča pogostost polnjenja, kar bo zmanjšalo doseg invalidskega vozička.
- Baterije ne odpirajte in ne mečite v ogenj. V baterijo ne vstavljajte tujih predmetov.
- Ne dotikajte se baterije s kovinskimi predmeti. Baterija lahko eksplodira ali se poškoduje.
- Uporabljajte samo originalni polnilnik.
- Med vožnjo upoštevajte lokalne predpise in zakone.
- Baterijo lahko polnite neprekinjeno.
- Idealna temperatura za polnjenje baterije je od +10 °C do +30 °C.
- Če baterijo uporabljate dlje časa, bo njena temperatura višja. To je normalno stanje baterije.
- Če baterijo uporabljate v hladnem okolju, je doseg manjši.
- Baterije ne popravljajte ali spreminjajte sami.

POLNENJE BATERIJE

Baterija se polni z izmeničnim tokom 110 – 240V pri 50 – 60 Hz, izhodna napetost pa je 24V z 2Ah polnilnikom.

Pred prvo uporabo napolnite baterijo. Nato jo z uporabo izpraznite, ne vozite hitro in se ne oddaljujte predaleč od svojega bivališča, dokler se ne naučite upravljati z vozičkom. Nato ponovno napolnite baterijo 8-14 ur. Po 4-5 ciklih polnjenja bo zmogljivost baterije dosegla 100% kapaciteto.

INFORMACIJE O BATERIJAH

Po uporabi čim pogosteje napolnite baterijo. Baterija se postopoma prazni tudi če ni v uporabi. Če vozička ne uporabljate redno, napolnite baterijo enkrat tedensko. Uporabljajte samo originalni polnilec.

VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE

- Za čiščenje uporabljajte blaga čistila in vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.
- Vedno dobro posušite vse dele, zlasti elektronske dele.
- Krmilnik in ploščo hranite stran od vode.
- Preverite stanje kablov in povezav.
- Za čiščenje ne uporabljajte visokotlačnih čistilnikov.
- Invalidski voziček shranjujte v dobro prezračevanem prostoru brez jedkih plinov in zračne vlažnosti manj kot 80 %.

VARSTVO OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če morebitno popravilo ni gospodarno, ga zavržite v skladu z lokalno zakonodajo in okolju prijazno na najbližjem odpadku.

S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagate zaščititi zdravje ljudi. Če niste prepričani v pravilno odlaganje, prosite lokalne oblasti, da se izognete kršitvam zakonodaje ali sankcijam.

Baterij ne odlagajte med hišne odpadke, temveč jih oddajte na reciklažo.