

PRIROČNIK ZA UPORABO – SLO
IN29201 Električni invalidski voziček inSPORTline Zauney



VARNOSTNA NAVODILA


- Pred uporabo preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- V primeru nenadnega gibanja vozička, okvare upravljanja ali druge napake takoj izklopite voziček.
- Pred prvo uporabo vozička opravite poskusno vožnjo v znanem okolju pod nadzorom druge osebe.
- Voziček uporabljajte v skladu z lokalnimi predpisi, uredbami in zakoni.
- Prste in okončine držite stran od gibljivih delov.
- Ne uporabljajte obrabljenega ali poškodovanega vozička.
- Če se na vozičku pojavijo ostri robovi, ga ne uporabljajte.
- Vozička ne spreminjajte ali prilagajajte. Uporabljajte ga le za namen, za katerega je bil izdelan.
- Voziček sme uporabljati le oseba, ki je seznanjena z upravljanjem in varnim delovanjem.
- Voziček zaščitite pred fizičnimi poškodbami, padci in udarci.
- Baterijo zaščitite pred fizičnimi poškodbami, padci in udarci.
- Če iz baterije prihaja vonj, dim ali tekočina, jo takoj odklopite in, če je mogoče, voziček premaknite stran od gorljivih in eksplozivnih predmetov.
- Uporabljajte le originalno baterijo in polnilec.
- Voziček polnite pod stalnim nadzorom in stran od gorljivih in eksplozivnih predmetov.
- Med polnjenjem voziček ne sme biti v uporabi.
- Električne dele zaščitite pred vdorom vode.
- Ne izpostavljajte dolgotrajnemu sončnemu sevanju.
- Če voziček ni vklopljen ali v gibanju, ne premikajte upravljalnega joysticka.
- Ne vozite po prestrmih klancih – obstaja nevarnost prevračanja.
- Pri vožnji navzdol nadzorujte hitrost – ne pospešujte.
- Na mokri ali spolzki površini se zavorna pot podaljša in obstaja nevarnost izgube nadzora nad vozičkom.
- Ne izpostavljajte vozička dolgotrajnim vremenskim vplivom.
- Voziček je namenjen prevozu ene osebe naenkrat.
- Voziček ni zasnovan kot vlečna naprava.

- Vozička ne vlecite za drugim vozilom.
- Osebe s telesnimi omejitvami ali duševnimi motnjami smejo voziček uporabljati le pod nadzorom druge odrasle osebe ali skrbnika.
- Ne uporabljajte pod vplivom alkohola, drog ali zdravil, ki vplivajo na presojo in reflekse.
- Nosilnost: 100 kg

Opomba za upravljanje zvočnih obvestil:


- **IZKLOP:** Po vklopu držite gumb + 5 sekund za izklop zvočnih obvestil.
- **VKLOP:** Po vklopu držite gumb + 5 sekund za vklop zvočnih obvestil.

SHEMA ELEKTRIČNEGA VEZJA

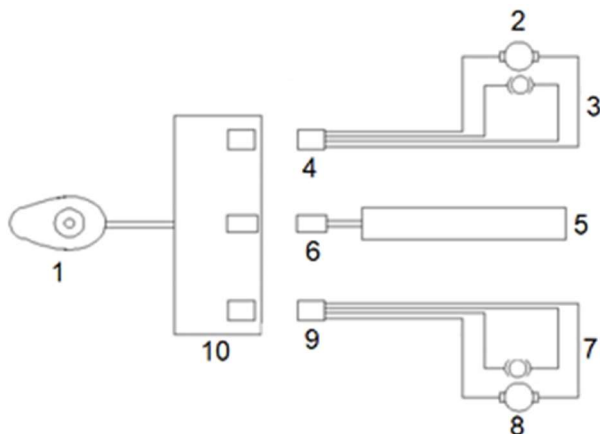

1. Krmilna palica	6. Priključek baterije
2. Desni motor	7. Levi volan
3. Desni volan	8. Levi motor
4. Priključek desnega motorja	9. Priključek levega motorja
5. Litijeva baterija 24 V	10. Krmilna enota

OPIS IZDELKA

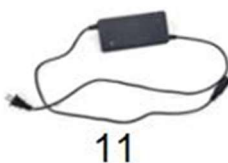

1. Upravljanje
2. Sedež
3. Opora za noge
4. Sprednje kolo
5. Ročaj
6. Naslonjalo za hrbet
7. Naslonjalo za roke
8. Litijeva baterija
9. Okvir
10. Pogonska kolesa
11. Polnilec
12. Elektromagnetna zavora
13. Pogon


SESTAVLJANJE

Vzemite invalidski voziček iz embalaže in ga postavite na ravno, čisto površino.

Zrahljajte trak (1), ki drži naslonjalo in ogrodje sedeža (slika 1). Nato razgrnite ogrodje (slika 2).

Prepričajte se, da je mehanizem za zlaganje (2) pritrjen z zatiči (slika 3).

Ko razgrnete in pritrдите invalidski voziček, pritrдите nadzorno ploščo s sponko in priključite kable (slika 4).

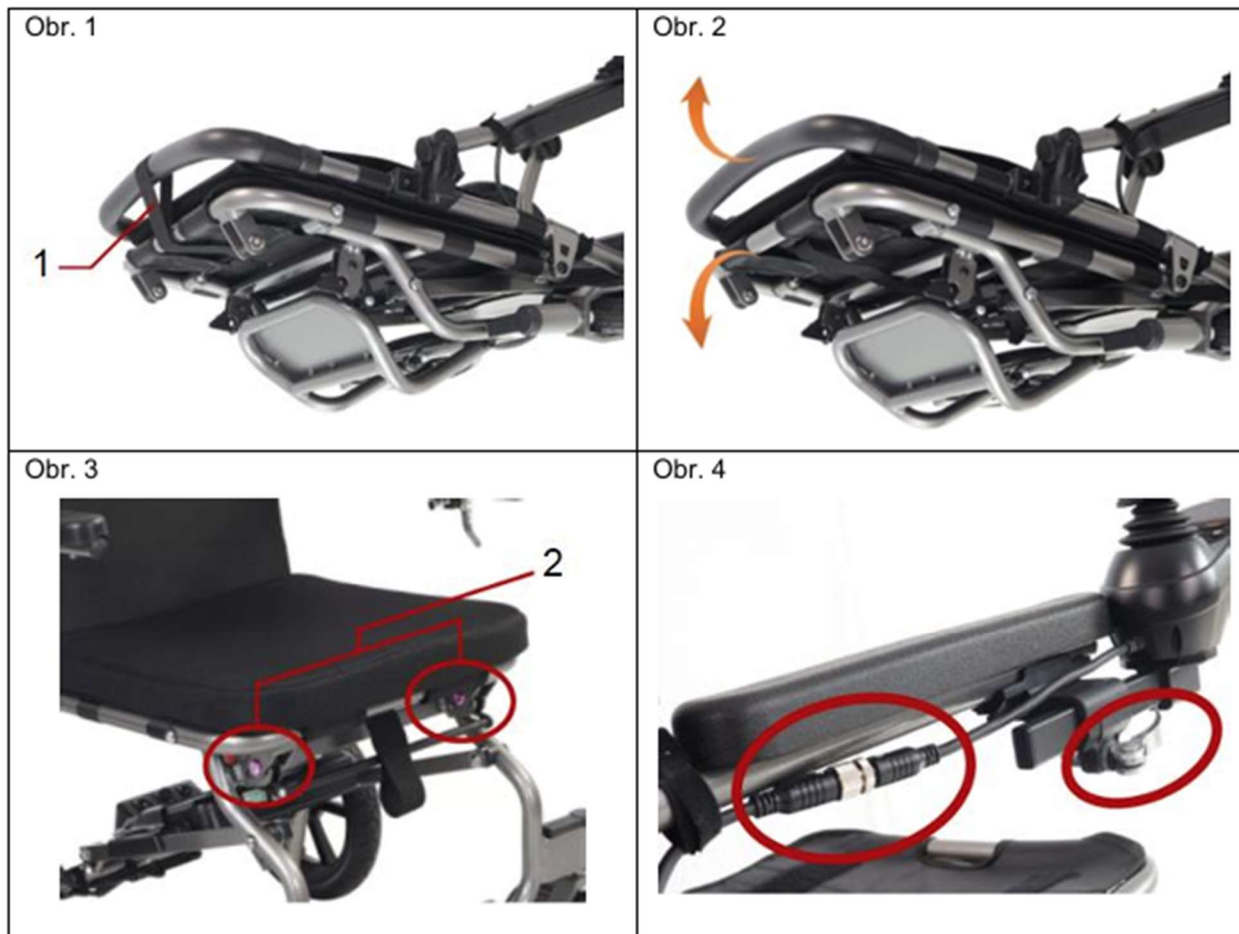

ZLAGANJE

Pred zlaganjem se prepričajte, da je invalidski voziček izklopljen.

Z eno roko primite mehanizem za zlaganje pod sedežem, z drugo pa ogrodje naslonjala (slika 5).

Ogrodje sedeža in ogrodje naslonjala zložite skupaj (slika 6).

Postopek zlaganja in oblika invalidskega vozička po zlaganju (slika 7).

Nazadnje zložite oporo za noge (slika 8).



NASTAVITEV PREMIČNIH DELOV

Nastavitev nadzorne plošče

Razdalja nadzorne plošče se lahko nastavi s teleskopskim okvirjem. Po nastavitvi želene dolžine je treba nadzorno ploščo zavarovati pred neželenim premikanjem.




Dvigovanje naslona za roke

Naslonjalo za roke lahko dvignete, da olajšate vstop/izstop.



Magnetna zavora

Položaj ročice magnetne zavore določa, ali je invalidski voziček mogoče potiskati (B) ali pa ga premika pogon (A).

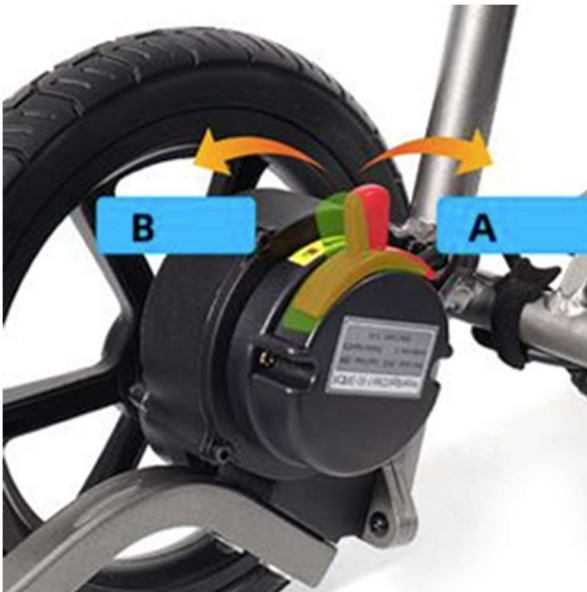

KONTROLNI ELEMENTI



Trenutno stanje baterije



Trenutna hitrost



Način hitrosti



Prevožena razdalja



Gumb za vklop



Zmanjšanje hitrosti



Povečanje hitrosti

Po zagonu invalidskega vozička pritisnite gumb 5 sekund, da vklopite/izklopite zvočna obvestila



Pritisnite za vklop/izklop luči

Držite, da se oglasi hupa, hupa se bo izklopila, ko spustite gumb

Stikalo za vklop: S stikalom za vklop vklopite/izklopite invalidski voziček. Stikalo za vklop lahko v nujnih primerih uporabite kot gumb za zaustavitev v sili.

Krmilna palica: S krmilno palico upravljajte smer in hitrost vožnje. Dlje ko je krmilna palica od središča, višja je hitrost. Ko spustite krmilno palico, se vrne v prvotni položaj in invalidski voziček se ustavi.

Hupa: Držite gumb, da sprožite hupo.

Gumbi za nastavitev hitrosti: S temi gumbi nastavite največjo hitrost. Če se invalidski voziček začne nenadoma premikati ali če pride do kakršne koli nevarnosti, takoj spustite krmilno palico in invalidski voziček se bo ustavil.

Polnjenje: Invalidski voziček napolnite z originalnim polnilnikom. Nikoli ne priključujte drugih naprav na polnilno vtičnico.

Baterija: Pred prvo uporabo napolnite baterijo. Čas polnjenja baterije je 6–8 ur. 100-odstotno zmogljivost baterije boste dosegli po približno 5 ciklih polnjenja.

Invalidskega vozička ne uporabljajte, če je temperatura okolice nižja od –25 °C ali višja od +50 °C.

Parametri baterije:

Tip: Litijeva baterija

Dimenzije: 179*231,5*45 mm

Napetost: 24 V

Kapaciteta: 10 Ah*1

POLNLENJE

Pred polnjenjem se prepričajte, da je voziček izklopljen.

Priključite polnilec.

Prikazana bo ikona polnjenja (1) in stanje napolnjenosti baterije (2). Čas polnjenja je 6–8 ur.

Po polnjenju odklopite polnilec.



BATERIJA

Garancija 6 mesecev na življenjsko dobo baterije – nazivna kapaciteta baterije ne sme pasti pod 70 % svoje skupne kapacitete v obdobju 6 mesecev od prodaje izdelka. Za pravilno delovanje in varno uporabo baterije upoštevajte navodila v priročniku. Če je baterija poškodovana, iz nje uhaja tekočina ali nenavaden vonj, takoj prenehajte z uporabo.

- Življenjska doba baterije je omejena. Če uporabljate baterijo, ki presega običajno življenjsko dobo, se lahko poveča pogostost polnjenja in zmanjša doseg.
- Baterije ne odpirajte in je ne mečite v ogenj. Vanjo ne vstavljajte tujih predmetov.
- Ne dotikajte se baterije s kovinskimi predmeti – lahko eksplodira ali se poškoduje.
- Uporabljajte le originalni polnilec.
- Med vožnjo upoštevajte lokalne predpise in zakone.
- Baterijo lahko sproti dopolnujete.
- Idealna temperatura za polnjenje baterije je med +10 °C in +30 °C.
- Če baterijo uporabljate v hladnem okolju, bo njen doseg manjši.
- Baterije ne popravljajte ali spreminjajte sami.

INFORMACIJE O BATERIJI

Baterijo polnite čim pogosteje po uporabi. Baterija se postopoma prazni tudi, če ni v uporabi. Če vozička ne uporabljate redno, baterijo polnite enkrat tedensko. Uporabljajte le originalni polnilec.

ZAŠČITA PRED PREOBREMENITVIJO IN NAPETOSTNA ZAŠČITA

Če se aktivira zaščita, se napajanje vozička samodejno izklopi. Za ponovni zagon napajanja izklopite in ponovno priključite baterijski konektor na upravljalni plošči.

ZAVORA

Če želite, da voziček ostane na mestu, nastavite zavoro v zgornji položaj.

Če želite nadaljevati vožnjo, je treba zavoro prestaviti v spodnji položaj.

VARNOSTNI PAS

Med vožnjo mora biti uporabnik pripet z varnostnim pasom.

Med vožnjo ne kadite, izogibajte se odprtemu ognju in ne uživajte alkohola ali zdravil, ki vplivajo na presojo.




VOŽNJA

Prvo vožnjo in upravljanje vozička vadite na ravnem, odprtem in znanem terenu. Prvo vožnjo opravite s podporo in pomočjo druge osebe.

Preden sedete na voziček, se prepričajte, da je izklopljen. Med vstopanjem in izstopanjem ne stopajte na opore za noge.

Med prvo vožnjo nastavite hitrost na najnižjo raven. Preizkusite gibanje naprej/nazaj, nato pa še zavijanje med vožnjo.

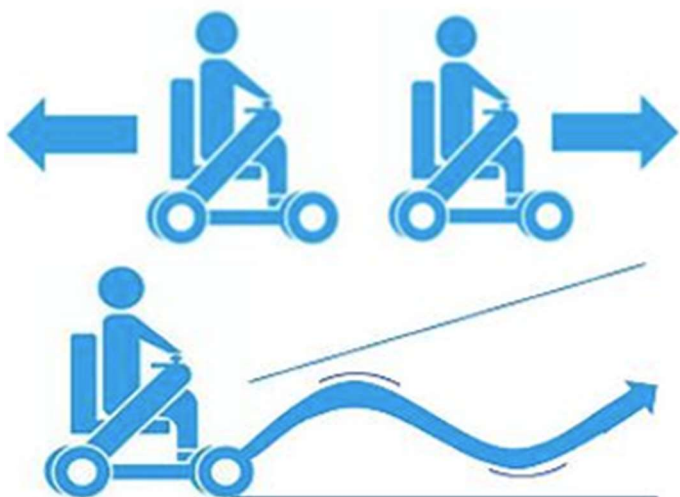

Dlje ko je krmilna palica od središča, hitreje se premikate. Vzvratno se premikajte počasi in previdno. Če želite ustaviti, spustite krmilno palico, ta se bo samodejno vrnila v središče in viličar se bo ustavil.



Ne vozite čez ovire, ki so višje od 3 cm in širše od 10 cm.



VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Za čiščenje uporabljajte blage detergente in vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih detergentov.
- Vedno temeljito posušite vse dele, zlasti elektronske dele.
- Krmilnik in ploščo hranite stran od vlage.
- Preverite stanje kablov in priključkov.
- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov ali visokotlačnih čistilcev.
- Viličar shranite v dobro prezračenem prostoru brez korozivnih plinov in z vlažnostjo zraka manj kot 80 %.

del	vsak dan	Vsak teden	Vsak mesec	Vsake 3 mesece	Vsaki 6 mesecev
Baterija	-				
Napajalni paket		-			
Baterijski terminal			-		
Povezovalni snop			-		
Okvir				-	
Gibljivi deli				-	
Sedež					-
Ležaji					-
Kolesa					-
Elektromagnetna zavora					-

VARSTVO OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če morebitno popravilo ni gospodarno, ga zavržite v skladu z lokalno zakonodajo in okolju prijazno na najbližjem odpadku.

S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagate zaščititi zdravje ljudi. Če niste prepričani v pravilno odlaganje, prosite lokalne oblasti, da se izognete kršitvam zakonodaje ali sankcijam.

Baterij ne odlagajte med hišne odpadke, temveč jih oddajte na reciklažo.